

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Le Système Invisalign est prescrit par un praticien et est composé d'une série d'appareils orthodontiques (aligners) qui sont amovibles, fins, fabriqués en plastique transparent et qui déplacent progressivement les dents du patient de leur position initiale à une position plus optimale.

INDICATIONS POUR L'UTILISATION

Le Système Invisalign est indiqué pour l'alignement des dents pendant le traitement orthodontique des malocclusions.

CONTRE-INDICATION

Le Système Invisalign est contre-indiqué pour les patients présentant les conditions suivantes:

- Maladie parodontale active.

AVERTISSEMENTS

- Dans de rares cas, certains patients peuvent être allergiques à la matière plastique des aligners.
- Dans de rares cas, certains patients peuvent présenter un œdème angioneurotique héréditaire (OANH), une affection héréditaire, résultant en des gonflements rapides des tissus sous-cutanés comprenant le larynx. Un œdème angioneurotique héréditaire peut être déclenché par des stimuli légers y compris les procédures dentaires.
- Dans de tels cas, cesser l'utilisation et consulter immédiatement un professionnel de santé. Veuillez également le signaler à Align Technology.
- Les appareils orthodontiques, ou des parties de ceux-ci, peuvent être accidentellement avalés ou aspirés, et s'avérer dangereux.

PRÉCAUTIONS

- Gardez les aligners à distance des produits chimiques et de l'eau chaude.
- Gardez les aligners hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Rangez toujours les aligners dans un endroit frais et sec.
- Le traitement des béances et surplombs sévères, dentures mixtes, et/ou des mâchoires étroites, peuvent exiger un traitement supplémentaire en plus du traitement avec les aligners.
- Des appareils d'expansion squelettique, des auxiliaires, des élastiques et d'autres appareils orthodontiques fixes et/ou amovibles, peuvent être nécessaires pour les plans de traitement plus complexes où les aligners seuls peuvent ne pas être suffisants pour obtenir le résultat désiré.
- La chirurgie orale peut être nécessaire pour corriger les problèmes d'encombrement sévères ou les déséquilibres de mâchoire. Si la chirurgie orale est exigée, les risques associés à l'anesthésie et à la guérison doivent être pris en compte avant le traitement.
- Les dents de formes atypiques, en éruption et/ou manquantes, peuvent affecter l'adaptation des aligners et peuvent affecter leur capacité à accomplir les résultats désirés.
- Les restaurations dentaires existantes (par ex., les couronnes, bridges) peuvent être déplacées et peuvent exiger un rescellement ou, dans certains cas, un remplacement.
- Les aligners ne sont pas efficaces pour le déplacement d'implants dentaires.
- Certaines conditions médicales et une utilisation de certaines médicaments peuvent affecter les résultats du traitement orthodontique.
- Un endolorissement dentaire peut apparaître après la mise en place de l'aligner initial et après chaque changement d'aligner dans la série.
- Le produit peut temporairement affecter l'élocution et provoquer un zélalement, bien que tout obstacle d'élocution associé au produit disparaisse d'habitude après une ou deux semaines.
- Le non-respect du temps de port des aligners et/ou le non-respect des indications du praticien, peuvent rallonger le temps de traitement et affecter la qualité des résultats.
- La gencive, les joues, ou les lèvres peuvent avoir des égratignures ou peuvent être irrités par le produit.
- Les taquets peuvent être temporairement collés à une ou plusieurs dents pendant le traitement afin de faciliter la rétention des aligners et/ou les mouvements dentaires.
- Les taquets peuvent se décoller et exiger un remplacement.
- Tous les taquets doivent être enlevés à la fin du traitement.
- Les risques liés à la réduction interproximale, qui peut être prescrite pour créer de l'espace pour le mouvement des dents comme faisant partie du traitement, doivent être pris en compte.
- Une détérioration des dents, une maladie parodontale, des taches permanentes de colorant et des décalcifications peuvent se produire si les patients ne respectent pas une bonne hygiène buccale pendant le traitement ou s'ils consomment des aliments ou des boissons contenant du sucre en portant les aligners.
- L'occlusion peut changer en cours de traitement et peut provoquer un inconfort temporaire chez le patient.
- L'occlusion peut nécessiter un ajustement par le praticien à la fin du traitement.
- Les dents peuvent changer de position après le traitement. Le port régulier d'aligners de contention à la fin du traitement devrait réduire cette tendance.
- Il est recommandé que toutes les dents soient au moins partiellement couvertes par les aligners pour aider à prévenir une sur-éruption.
- L'augmentation temporaire de la salivation ou une sécheresse de bouche peuvent se produire.
- Une dent qui a été auparavant traumatisée ou restaurée de façon significative peut être détériorée. Dans de rares cas, la durée de vie de la dent pourrait être réduite, la dent pourrait exiger un traitement dentaire supplémentaire comme un traitement endodontique ou une restauration supplémentaire, et/ou la dent pourrait être perdue.
- La santé de l'os et des gencives qui soutiennent les dents peut être atteinte.
- La longueur des racines dentaires peut se raccourcir au cours du traitement orthodontique, compromettant la durée de vie des dents.
- Dans de rares cas, des problèmes de l'articulation temporo-mandibulaire peuvent survenir et se manifester par des douleurs généralisées, des migraines, ou des problèmes d'oreille.

MODE D'UTILISATION

1. Rincez les nouveaux aligners avec de l'eau froide avant de les utiliser.
2. Si une extraction a été pratiquée dans le cadre du traitement, conservez l'espace pendant la durée de la cicatrisation. Les taquets seront collés seulement après que l'espace d'extraction ait complètement cicatrisé.
3. Consulter la brochure «Instructions d'Utilisation et d'Entretien de vos aligners Invisalign» avec le patient.